



DE

ISOSAF™ Stützschlauch zum Stillen

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie sich vor der Verwendung diese Gebrauchsanweisung durch.

VORGESEHENE ANWENDUNG

Dafür vorgesehen, Müttern die Simulation des Stillens zu ermöglichen, wenn sie anderenfalls nicht stillen könnten. Der Stützschlauch kann dafür verwendet werden, das Saugen zu üben, die Milchproduktion der Mutter anzuregen und den Hautkontakt zwischen Mutter und Kind zu unterstützen. Kann mit abgepumpter oder angereicherter Muttermilch oder Muttermilchersatz verwendet werden.

VORGESEHENE ANWENDER

Mütter mit unzureichender oder ausbleibender Laktation.

VORGESEHENE PATIENTENPOPULATION

Babys mit schwachem Saugverhalten oder mit Problemen, lange genug ein Vakuum zum Stillen aufrecht zu erhalten.

ANGABEN ZUR VERWENDUNG

Der Stützschlauch zum Stillen ist für die Verwendung mit abgepumpter, angereicherter oder Ersatzmuttermilch vorgesehen.

KONTRAINDIKATIONEN

Kann nicht von Müttern verwendet werden, die aus Krankheitsgründen nicht stillen können oder Medikamente einnehmen, die Babys nicht vertragen.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN



- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder geöffnet ist.
- Einmalige Anwendung. Nicht wiederverwenden. Wiederverwendung kann zu Einschränkungen der Produktfunktionalität sowie zu Infektionsrisiko führen.
- Die Komponenten werden steril bereitgestellt. Nicht erneut sterilisieren.

PACKUNGSIHALT

- 1 x Enteraler Stützschlauch zum Stillen
- 1 x Clear Grip-Fixierpflaster

ANLEITUNG

- Platzieren Sie den Schlauch auf der Brust, sodass er um 1 cm von der Brustwarze hervorsteht.
- Dadurch wird vermieden, dass die (vergrößerte) Brustwarze beim Stillen die Schlauchöffnung blockiert. Sichern Sie den Schlauch mithilfe des in der Packung enthaltenen Clear Grip-Pflasters.

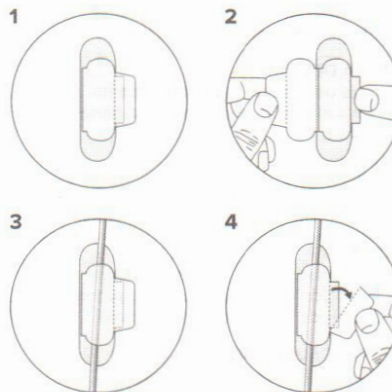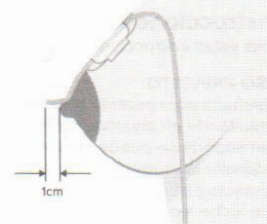

- Halten Sie Ihr Baby nah an Ihre Brust. Um Ihr Baby dazu zu motivieren, seinen Mund zu öffnen, berühren Sie seine Unterlippe mit Ihrer Brustwarze. Überprüfen Sie, ob der Schlauch in der Mitte der Oberlippe oder im Mundwinkel Ihres Babys liegt.
- Wenn Ihr Baby seinen Mund weit geöffnet hat, halten Sie es an Ihre Brust. Es ist wichtig, dass der Mund des Babys weit geöffnet ist, damit es ordnungsgemäß andockt und effektiv trinkt. Sowohl der Schlauch als auch die Brust sollten sich im Mund Ihres Babys befinden.
- Die Milch kann per Erdanziehungskraft, manuell über eine Spritze oder mithilfe einer Spritzenpumpe abgegeben werden.
- Die Milch sollte Ihrem Baby in einer angemessenen Geschwindigkeit verabreicht werden. Lassen Sie sich von einer medizinischen Fachkraft beraten.
- Der Stützschlauch zum Stillen ist mit einem ENFit-Anschluss versehen. Dieser sollte ausschließlich an enterale ENFit ISO80369-3-Ernährungsgeräte angeschlossen werden.

AUFBEWAHRUNGSHINWEISE

Trocken aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

REINIGUNG & DESINFEKTION

Entfällt – einmalig anzuwendendes Produkt. Bitte nach Verwendung den Anweisungen der Klinik entsprechend entsorgen.

ENTSORGUNG

Bitte gemäß den lokalen Richtlinien entsorgen.

Milchwiese GmbH
Milchpumpen | The Female Health Company

Kaiserdamm 19
14057 Berlin
Telefon 030 | 89402044
030 | 89402045
Fax 030 | 89402046

info@milchwiese.de
www.milchwiese.de



Die Milchwiese GmbH ist nach
DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert
Zert.Nr. 91023576/1