



DE Gebrauchsanweisung für Nabelklemmen

Produktname
Nabelklemme

Zweckbestimmung
Die Nabelklemme dient dem sicheren Verschluss der postnatal durchtrennten Nabelschnur beim Neugeborenen. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt. Das Produkt ist nur von geschultem, medizinischem Personal anzuwenden.

Leistungsmerkmale des Produkts
Die Nabelklemme verfügt über zwei gezahnte Greifflächen, die einen sicheren Halt der restlichen Nabelschnur gewährleisten. Die Greifflächen sind auf einer Seite geschlossen miteinander verbunden. Die offene Seite verfügt über einen Verschluss, der nach hörbarem Einrasten, ohne Hilfsmittel, nicht mehr zu öffnen ist.
REF 07.044.00.00 – Nabelklemme, steril

Materialien
Polyacetal (POM)

Kontraindikationen
Bitte verwenden Sie das Produkt nicht bei bekannten Empfindlichkeiten bzw. Allergien gegen das genannte Material. Weitere Kontraindikationen sind derzeit nicht bekannt.

Anwendung

- Das Produkt ist unter aseptischen Bedingungen anzuwenden.
- Halten Sie die Nabelklemme so, dass die Verschlusshaken sichtbar sind.
- Dickere Nabelschnüre sind an der geschlossenen Seite abzuklemmen.
- Nach Einlagen der Nabelschnur zwischen die Greifflächen, beide Seiten vom Verschluss richtig zueinander platzieren.
- Zum sicheren Verschluss müssen beide Haken durch Zusammendrücken hörbar mit einem „Click“ einrasten.
- Durchtrennen Sie die Nabelschnur gemäß medizinischen Standards.
- Vor dem Anziehen und Wickeln des Neugeborenen kontrollieren Sie bitte nochmals den korrekten Verschluss der Nabelklemme.
- Bitte führen Sie die Versorgung und Pflege der abgeklemmten Nabelschnur gemäß Ihren Vorschriften und Standards durch.

Sicherheitshinweise

- Bei nicht korrektem Einrasten kann sich die Klemme öffnen. Dies kann zu lebensbedrohlichen Blutungen beim Neugeborenen führen.
- Die Nabelklemme nicht entfernen, bevor die Nabelschnur vollständig eingetrocknet ist.
- Dieses Produkt ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt. Eine Wiederverwendung führt zu Keimvermehrung und Keimverschleppung. Sterilisation und Reinigung (zur Wiederverwendung) können die Funktion und Wirkungsweise des Produktes beeinträchtigen und Patientengefährdung hervorrufen.
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß Ihren hausinternen Anweisungen und lokalen Vorschriften.

Zusätzliche Informationen

Alle im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt auftretenden schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.



Milchwiese eine Marke der Witzleben Apotheken
The Female Health Company

Kaiserdamm 19
14057 Berlin
Telefon 030 | 89402044
030 | 89402045
Fax 030 | 89402046

milchwiese@witzleben-apotheke.de
www.milchwiese.de